

Urindroppssamlare

- ▶ Latexfri
- ▶ Sitter säkert
- ▶ Knickfri

Conveen



Conveen Security+ urindroppssamlare

Conveen Security+ urindroppssamlare är ett latexfritt alternativ och används av män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Alla urindroppssamlare är försedda med anti-knick utförande vilket innebär att urinen alltid rinner fritt.

Conveen Security+ självhäftande urindroppssamlare gör fixeringen enkel och hygienisk tack vare applikatorn och den inbyggda häftan. Urindroppssamlaren placeras över ollonet, rullas ut och applikatorn tas bort. Urindroppssamlaren kramas runt penis så att den fästes ordentligt.

I **Conveen** tvådelssystem finns en icke häftande urindroppssamlare och ett häftstrip i samma förpackning. **Conveen** häftstrip av curagard är elastiskt och försett med häftmaterial på båda sidor. Häftstripet placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över det.

Urindroppssamlare kombineras med urinuppsamlingspåse.

Användartips

Vid tvätt av penis, använd icke återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt. Det är också viktigt att få rätt storlek på urindroppssamlaren. Mät penis i avslappnat tillstånd, vid penisroten. Det görs lättast med **Conveen** mätsticka. Kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 56.

Conveen Security+	Omkrets (mm)	Förp (styck)	Diameter (mm)	Längd	Coloplast art nr
Självhäftande Standard med applikator	70	30	21	Standard	052212
	80	30	25	Standard	052252
	90	30	30	Standard	052302
	105	30	35	Standard	052352
	125	30	40	Standard	052402
Självhäftande Kort med applikator	70	30	21	Kort	220110
	80	30	25	Kort	220120
	90	30	30	Kort	220130
	105	30	35	Kort	220140
Urindroppssamlare med häftstrip (kombipack)	70	30	21	Standard	050210
	80	30	25	Standard	050250
	90	30	30	Standard	050300
	105	30	35	Standard	050350
	125	30	40	Standard	050400



Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
e-post: se@coloplast.com
www.coloplast.se



341253 SANDSTENS TRYCKERI

Miljöfakta

Avfallshantering

Förpackning: Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas. Sortera och lämna till förpackningsinsamlingen. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.

Produkt: Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

Certifiering

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern, USA och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt bli certifierade.

Urindroppssamlare

Conveen



- ▶ Latex
- ▶ Sitter säkert
- ▶ Knickfri



Conveen urindroppssamlare

Conveen urindroppssamlare är tillverkad i latex och används av män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Alla urindroppssamlare är försedda med anti-knick utförande vilket innebär att urinen alltid rinner fritt.

Conveen självhäftande urindroppssamlare gör fixeringen enkel och hygienisk tack vare applikatorn och den inbyggda häftan. Urindroppssamlaren placeras över ollonet, rullas ut och applikatorn tas bort. Urindroppssamlaren kramas runt penis så att den fästes ordentligt.

I **Conveen** tvådelssystem finns en icke häftande urindroppssamlare och ett häftstrip (varje del säljs separat) och ett kombipack (delarna finns i samma förpackning).

Conveen häftstrip av curagard är elastiskt och försett med häftmaterial på båda sidor. Häftstripet placeras runt penis mot penisroten och urindroppssamlaren rullas ut över det.

Urindroppssamlare kombineras med urinuppsamlingspåse.

Användartips

Vid tvätt av penis, använd icke återfettande tvål för att säkerställa att urindroppssamlaren fäster ordentligt. Det är också viktigt att få rätt storlek på urindroppssamlaren. Mät penis i avslappnat tillstånd, vid penisroten. Det görs lättast med **Conveen** mätsticka. Kan beställas utan kostnad från Coloplast kundservice, tel 0300-332 56.

Conveen	Omkrets (mm)	Förp (styck)	Diameter (mm)	Längd	Coloplast art nr
Självhäftande med applikator	● 70	90	20	Standard	052120
	● 80	90	25	Standard	052000
	● 90	90	30	Standard	052050
	● 105	90	35	Standard	052100
	● 125	90	40	Standard	052150
Urindroppssamlare utan häftstrip	● 70	100	20	Standard	051020
	● 80	100	25	Standard	051030
	● 90	100	30	Standard	051040
	● 105	100	35	Standard	051050
	● 125	100	40	Standard	051060
Urindroppssamlare med häftstrip (kombipack)	● 70	30	20	Standard	051200
	● 80	30	25	Standard	051250
	● 90	30	30	Standard	051300
	● 105	30	35	Standard	051350
	● 125	30	40	Standard	051400
Häftstrip		100		113x16 mm	051000

