


Urinuppsamlingspåse

Conveen



- ▶ Knickfri slang
- ▶ PVC-fri
- ▶ Tömbar
- ▶ 350 ml, 500 ml och 750 ml

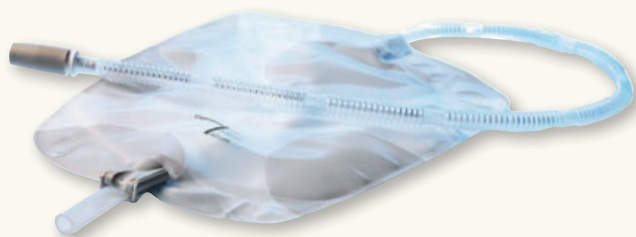

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är en PVC-fri, tömbar benpåse. Baksidan är försedd med mjuk och hudvänlig non-woven som gör kontakten mot benet mjuk och behaglig.

Fördelarna med att använda en tömbar påse är att risken för infektioner minskar, du slipper byta så ofta och det går utmärkt att koppla den till en annan påse för att få en större uppsamlingsvolym, t ex på natten. Påsens slang är knickfri vilket säkerställer att urinen rinner fritt även om slangens böjs eller vrids kraftigt.

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse går att kombinera med alla typer av katetrar och urindroppssamlare. Påsens tömningsventil är lätt att hantera.

Påsens kanter är försedda med hål avsedda till

Conveen fixeringsband. På banden finns knappar, som sätts i påsens förstansade hål. Bandet kan tvättas i 40 grader. Fixeringsbandet är latexfritt.



Användartips

När du kortar av den justerbara slangens, spara så mycket som möjligt av slangens släta del, så att du lätt kan trycka på konnektorn.

Conveen Security+	Konnektor	Förp (styck)	Volym (ml)	Coloplast art nr
6 cm slang	fast	30	350	210350
25 cm slang	avklippbar	30	350	051640
25 cm slang	fast	30	350	051641
6 cm slang	fast	30	500	210220
25 cm slang	avklippbar	30	500	051600
25 cm slang	fast	30	500	051601
50 cm slang	avklippbar	30	500	051610
50 cm slang	avklippbar*	30	500	051618
50 cm slang	fast	30	500	051611
25 cm slang	avklippbar	30	750	051660
25 cm slang	fast	30	750	051661
50 cm slang	avklippbar	30	750	051670
50 cm slang	avklippbar*	30	750	051678
50 cm slang	fast	30	750	051671
Fixeringsband		10 par		050501
Påshängare		10		050700

* Styckförpackad konnektor



Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungälv
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
e-post: se@coloplast.com
www.coloplast.se



341253 SANDSTENS TRYCKERI

Miljöfaktaruta

Coloplast fabriker i Danmark, Ungern och Kina är miljöcertifierade enligt den internationella standarden SS/EN/ISO 14001. Övriga fabriker kommer successivt bli certifierade. Coloplast AB är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. **Produkt:** Efter användning rekommenderar vi att produkten går till sophöbning med energiutvinning. **Förpackning:** Sortera och lämna till förpackningsinsamlingen. Allt material i Coloplast förpackningar kan återvinnas.

Urinuppsamlingspåse

Conveen

 Coloplast

- ▶ Flerkammarpåse 600 ml
- ▶ Urinuppsamlingspåse 1500 ml



◀ Conveen flerkammarpåse

Conveen flerkammarpåse fördelar urinen i flera kamrar vilket gör att den formar sig efter benet, reducerar skvalp och blir på så sätt extra diskret. Baksidan är försedd med mjuk och hudvänlig non-woven som gör kontakten mot benet mjuk och behaglig.

Fördelarna med att använda en tömbar påse är att risken för infektioner minskar, du slipper byta så ofta och det går utmärkt att koppla den till en annan påse för att få en större uppsamlingsvolym, t ex på natten.

Slangen är 65 cm lång och kan klippas av till önskad längd.

◀ Conveen 1,5 L urinuppsamlingspåse

Conveen urinuppsamlingspåse på 1500 ml används när det finns behov av större volymkapacitet och kan även användas som sängpåse. Baksidan är försedd med mjuk och hudvänlig non-woven som gör kontakten mot benet mjuk och behaglig.

Fördelarna med att använda en tömbar påse är att risken för infektioner minskar, du slipper byta så ofta och det går utmärkt att koppla den till en annan påse för att få en större uppsamlingsvolym, t ex på natten.

Slangen är 90 cm och finns både som avklippbar samt med en fast konnektor. Påsen har en tydlig volymgradering.

Påsens kanter är försedda med hål avsedda till **Conveen** fixeringsband. På banden finns knappar, som sätts i påsens förstansade hål. Bandet kan tvättas i 40 grader. Fixeringsbandet är latexfritt.

Conveen flerkammarpåse	Konnektor	Förp (styck)	Volym (ml)	Coloplast art nr
65 cm slang	avklippbar	30	600	051780
65 cm slang	avklippbar*	30	600	051788

* Styckförpackad konnektor

Conveen 1,5 L	Konnektor	Förp (styck)	Volym (ml)	Coloplast art nr
90 cm slang	avklippbar	100	1500	050620
90 cm slang	fast	100	1500	050621

Tillbehör	Förp (styck)	Coloplast art nr
Fixeringsband	10 par	050501
Påshängare	10	050700

