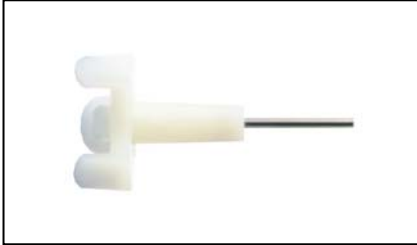


BD Diff Safe™ Droppstift**Produktnr. 366005**

Användningsområde: Bloddispenser Diff Safe™ används för att ta ur en droppe blod ur ett vakuurrör utan att öppna förslutningen, vid exempelvis blodutstryk.

Tillverkningsinformation

Juridisk tillverkare	Alpha Scientific corporation PO Box 725, Southeastern, PA 19 399-0725
Representant inom EU	BD Diagnostics – Preanalytical Systems Belliver Industrial Estate Plymouth, Devon, PL6 7BP Storbritannien
Tillverkningsplats:	USA

Sterilisering

Icke steril

Material

Rostfritt stål och plast

Engångsprodukt**Förvaring**

Undvik förvaring i direkt solljus

Märkning

All märkning uppfyller kraven i EU-direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och innehåller CE-märket.

Förpackningsspecifikationer

Produktnummer	366005
100 st. förpackningsmaterial	Polyetylen
100 st. förpackningsvikt	0,400 kg
1000 st. förpackningsmaterial	ask
1000 st. förpackningsvikt	1,000 kg
10000 st. förpackningsmaterial	kartong
10000 st. förpackningsvikt	5,2000 kg



Bruksanvisning

- 1. Håll röret i upprätt position**
- 2. Stick Diff Safe stiftet genom proppens gummimembran**
- 3. Blanda röret. Pressa stiftet mot objektglaset.**
- 4. Droppens storlek regleras enkelt genom hur länge stiftet hålles nedtryckt mot underlaget.**
- 5. Lyft röret, vänd det och avlägsna Diff Safe**
- 6. Släng det i riskavfallsbehållaren.**

Referenser

1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI; formerly NCCLS): Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard. Document H04-A6, Wayne, PA, USA, 2003.